

CTS-8800 PLUS ULTRASONOGRAFİ KULLANIM TALİMATI




AÇMA/KAPAMA BUTONU

Dikkat:

1. Cihazın açma ve kapama işlemi bu tuşa tek basış ile yapılır.
2. Kapama işlemi bu tuşa basmadan, direkt fişi çekme veya ana anahtarı kapama şeklinde kesinlikle yapmayınız.
3. Cihazı kapadıktan sonra ana anahtarı kapatmayı ve cihazı tekrar açmadan önce de ana anahtarı tekrar açmayı unutmayınız.

PROB BAĞLANTISI

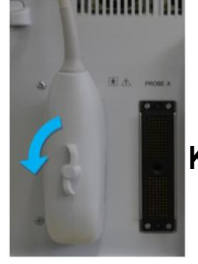

Serbest

Kilitli

Dikkat:

1. Gereksizce prob sökme/takma işlemi yapılmaz. Prop sökme takma ürün kapalıyken yapılır. Ürün konnektörü pinlerine ve konnektör yuvasına toz, çamur, sıvı gibi maddelerin deymemesine, konnektör pinleri bükülmemesine dikkat et.
2. Muayene bittikten sonra problemleri yumuşak bezle temizlemeyi unutmayın. Problemleri kesinlikle jelli bırakma. Düşürmeyin ve

DVD/CD ve USB



USB bağlantı

Dikkat:

Cihaza güvenli olmayan USB bellekleri kesinlikle bağlamayınız.

Monitör ayar tuşları

Görüntüleme modları tuşları,
B mod, 2B, 4B, B/M,
CFM, PW, B mod
düğmeleri

Açma /Kapama butonu

Ses ayarı

Açı ayarı

Doppler ayarları

Prob/muayene seçimi

Prob döndürme

Çevirme

Sine

Fokus

Print

Menü tuşu

Genel Ölçümler

Trakbal

Set tuşu

Frekans ayarı

Freeze tuşu

Bölgesel Kazanç Ayarı

Frekans Ayarı

Odaklama Ayarı

Rapor

Otomatik ayar

THI (Doku Harmonik)

4D (Opsiyonel)

Ekran Bölme

M Mod

Ürün Her kullanımdan sonra kirlenmiş ise temizlenir. Ürün, her çalışma öncesi ve sonrası fiziki kontrol yapılır. Ürün Tozsuz, temiz ortamda saklanır. Güneş altında bırakılmaz.