




VETERİNER RÖNTGEN (SF50) CİHAZI GENEL KULLANIM TALİMATI

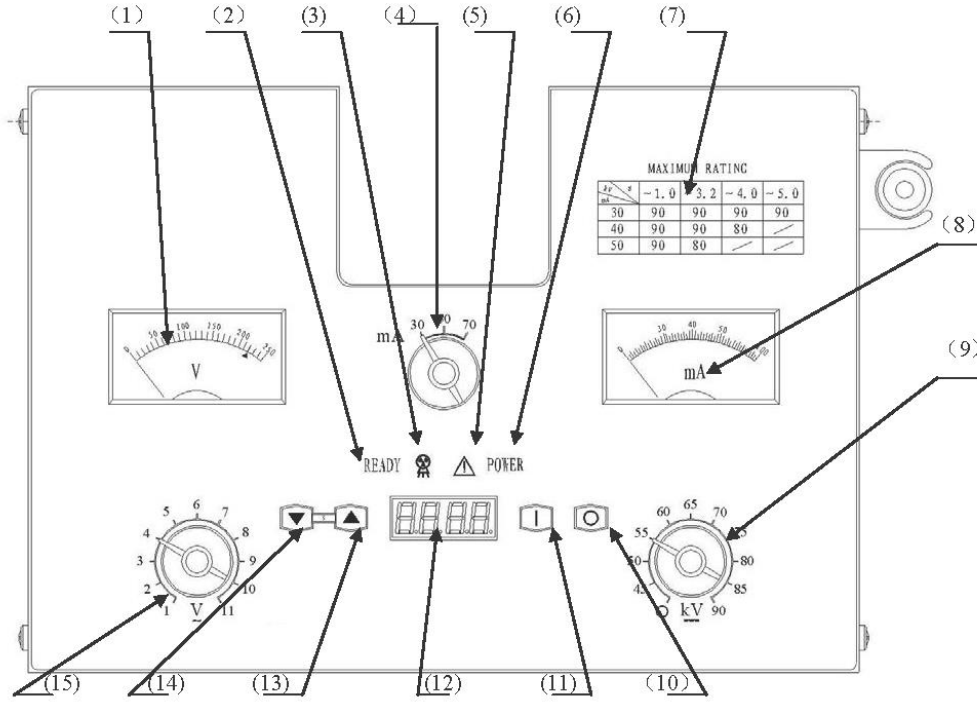

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Şebeke Voltajı Ayar Göstergesi | 6. Sistem Açık Işıklı Göstergesi | 11. Sistemi Açma Düğmesi |
| 2. READY / HAZIR Işıklı Göstergesi | 7. mA, kV ve saniye Ayar Tablosu | 12. Süre Ayarı Dijital Göstergesi (Saniye) |
| 3. Şutlama Yapılıyor Işıklı Göstergesi | 8. mA Göstergesi | 13. Süre Azaltma |
| 4. mA Ayar Potu | 9. kV Ayar Potu | 14. Süre Arttırma |
| 5. Arıza Uyarısı Işıklı Göstergesi | 10. Sistemi Kapatma Düğmesi | 15. Şebeke Voltajı Ayar Potu |

ÜRÜN KULLANIMI:

- 1) Ürün 220V alternatif akımlı ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.
- 2) 11. numaralı düğmeden sistem açılır. Bu sırada üründen bip sesi çıkabilir.
- 3) 15. numaralı pottan şebeke voltaj ayarı yapılır. Kademe 1. Numaralı göstergede yer alan üçgen işarete getirilmelidir. Bu sırada bip sesi kesilmelidir.
- 4) 4. numaralı mA Ayar potundan istenilen mA değerine ayarlanır.
- 5) 9. numaralı kV Ayar potundan istenilen kV değerine ayarlanır.
- 6) 13. ve 14. Numaralı süre ayar düğmeleri ile istenilen saniye süresi ayarlanır.
- 7) Hasta pozisyonlandıktan sonra Şutlama el butonu veya uzaktan kumanda yardımı ile şutlama yapılır.
- 8) Şutlama yapıldıktan sonra 2. Ready/Hazır ışığı söner ve sistem şutlama yapmaz. Tekrar şutlama yapılacaksa 2. Numaralı Ready/Hazır ışığı yanana kadar beklenmelidir. Bu süreyi sistem kendi belirler.
- 9) İşlem sonrası 10. Numaralı düğme ile sistem kapatılır. Sistemin açık kalması tavsiye edilmemektedir. Tüp ısınabilir. Tüpün ısınması durumunda 5. Numaralı Arıza Uyarısı Işıklı göstergesi yanar. Bu sırada sistem şutlamaya izin vermez. Isı sensörü arızası devreden çıkana kadar beklenmelidir. Bu süre 24 saate kadar uzayabilir. Bu süre beklenilmiş ise teknik servise başvurunuz.